

GUÍA DE INSTALACIÓN

REPOSAPIÉS "ELEVADOS" Y CHASIS FREEWHEEL PERSONALIZADO

Chasis FreeWheel adaptada para Reposapiés más Altos

Muchos niños y algunos adultos tiene en su silla de ruedas reposapiés que están más elevados de 4- $\frac{3}{4}$ " (12,065 cm) desde el suelo hasta la parte de superior del reposapiés. Si se dá esta situación, es necesario que dispongas de un "Chasis FreeWheel Personalizado".



Tallas Chasis FreeWheel Personalizados

Hay cuatro tallas de Chasis FreeWheel Personalizados: 5- $\frac{1}{2}$ " (13,97 cm), 6- $\frac{1}{2}$ " (16,51 cm) , 7- $\frac{1}{2}$ " (19,05) y 8- $\frac{1}{2}$ " (21,59 cm).

Cada una de estas tallas da la posibilidad de ajustarse 1" (2,54 cm) tanto hacia arriba como hacia abajo. En otras palabras, el reposapiés más alto con el que es compatible la FreeWheel es con un Chasis FreeWheel de 9- $\frac{1}{2}$ "(24,13 cm).

Cuando se realice el pedido de un Chasis FreeWheel personalizado, es importante que se incar como es el reposapiés, mediante el envío de fotos, con calidad suficiente pero con el menor peso posible, a: info@interortho.es Incluyendo lo siguiente:

1. Altura desde el suelo hasta la parte superior del Reposapiés en la parte Frontal y en la parte Posterior.
2. Profundidad del Reposapiés (para poder determinar el ángulo del reposapiés)

Si el Reposapiés en cuestión, tiene alzas, es necesario saber cómo de grueso es el reposapiés en sí mismo. Existe la posibilidad de proporcionar una "D modificada" que se instalará debajo del reposapiés, en el frontal, emulando el tubo donde se instala normalmente la FreeWheel.

