

SmartDrive MX2 + PushTracker

Guía de Inicio Rápido

¡IMPORTANTE!!

El modo de control por defecto del SmartDrive MX2+ ha cambiado. Si este modo no se ajuste a sus necesidades, puede escoger otro modo de control.

Por favor, antes de utilizar el cualquiera de los dispositivos es obligatorio la lectura de los Manuales de Usuario del SmartDrive y del PushTracker.



Se deben seguir todas las advertencias y precauciones de seguridad.




Con el SmartDrive encendido, presione y suelte el botón izquierdo de su PushTracker para activar la asistencia a la propulsión. Esta acción se notificará con una vibración y con el encendido del LED azul en el PushTracker.

En el modo de Control MX2+, realice un **GOLPETEO DOBLE** para iniciar. El motor empezará a acelerar de manera automática.

Para fijar la velocidad cruceo y que el Motor deje de acelerar realice un **UNICO GOLPETEO**, de esta manera mantendrá la velocidad a la que circula en el momento del golpeteo. Las propulsiones manuales no inician ni modifican la ayuda a la propulsión.

Para parar, realice un **GOLPETEO DOBLE** para desactivar el motor y acto seguido agarre ambos aros para reducir y/o frenar la silla de ruedas.

En otros modos de control esta acción se realiza de manera diferente.

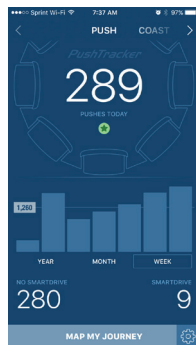

Para girar levemente mientras el motor está proporcionando ayuda a la propulsión, agarre levemente cualquiera de los aros para girar en la dirección que desea.

Tal y como haría sin el SmartDrive instalado.

Para realizar giros más cerrados mientras el motor está proporcionando ayuda a la propulsión, agarre firmemente cualquiera de los aros, mediante este procedimiento podrá incluso hasta girar sobre sí mismo.

Tal y como haría sin el SmartDrive instalado.

Asegúrese de descargar la App PushTracker a su smartphone. Es compatible con dispositivos Apple y Android. La puede descargar tanto del Apple Store como de Google Play Store.

www.interortho.es
www.max-mobility.com

